


採材説明書 (猫)

STEP.1

採材前の大切なポイント


- 出血箇所からの採材はさけてください。
- 食後またはケア後から2時間以上あけてください。

STEP.2

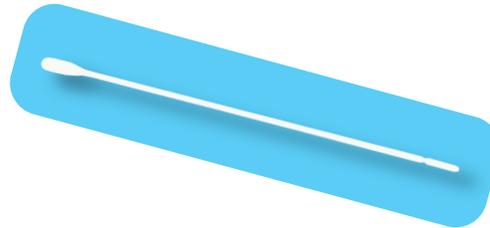

必ず**付属の綿棒**を使用してください。
 付属以外の綿棒を使用しますと正常な結果が得られません。


STEP.3

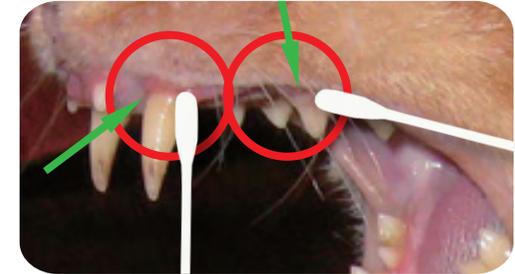

上顎犬歯、前臼歯、後臼歯の歯茎との境目付近を綿球で10回以上しっかりと擦ってください。(※採材のポイント)


STEP.4

- ①抽出液に採材した綿棒を浸して、10回以上回しながら十分に攪拌してください。
- ②攪拌後、チューブ壁面に綿球を当て可能な限り多くの液を絞り出してください。
- ③最後に、抽出液の蓋はしっかりと閉めてください。

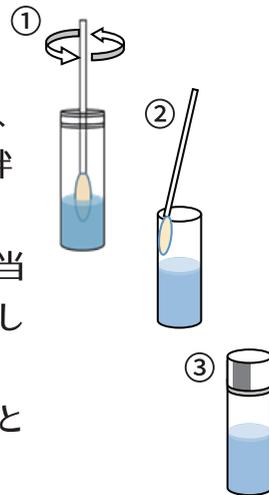

STEP.5

抽出後はビニール小袋に入れ、直ちに「**冷蔵**」または「**冷凍**」保管してください。

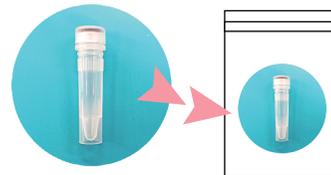

採材ポイント - 1

綿球は一方面だけでなく、回転させてまんべんなく使用してください。

採材ポイント - 2

歯石が溜まっている歯や歯周病の所見が認められる場合は、上顎犬歯以外にも所見が認められる歯での採材も可能です。